



DAW®  
INDUSTRIES



REHA®

# ePAD人体重心对线仪



重力测试板



重心测试板



激光仪

## 三大功能

- 1 LED光标实时显示人体重心位置
- 2 激光辅助指示人体重心线
- 3 数字显示承重数值

## 操作流程

- 1 ePAD人体重心对线仪由重力测试板、重心测试板和激光仪组成
- 2 让患者双脚站立在ePAD重力测试板上，通过数码显示屏的读数确定患者体重（图1）
- 3 让患者双脚分别站立在重力测试板和重心测试板上，通过重力测试板的数码显示读数确定患者双脚是否均匀承重（图2）
- 4 通过重心测试板前后侧及外侧的LED灯带的亮点显示单侧肢体在额状面和矢状面的重心位置（图2）
- 5 将激光仪对准前侧或外侧LED灯带的亮点，显示在人体额状面或矢状面上的激光扫描线即为肢体重心线（图2、图3）



图1

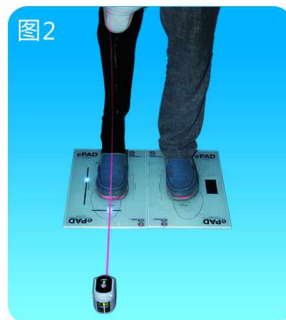


图2



图3

## 用途

- 1 确定人体下肢力线和站立姿势。
- 2 确定下肢假肢假脚、膝关节、髌关节的位置。
- 3 确定下肢矫形器与人体适配关系。

www.reha.cn

中国区独家代理 — 瑞哈国际假肢矫形器贸易有限公司

北京市通州区榆景东路金融街园中园6号院29号楼 4006-508-568



扫一扫添加瑞哈国际微信